


Test Catalyst Cortisol

Objevte interpretační komentáře založené na výsledcích

Interpretační komentáře k testu Catalyst™ Cortisol vám mohou pomoci určit nejlepší následné kroky pro vašeho pacienta. Abyste z těchto důležitých informací vytěžili maximum, zvažte následující otázky a poté postupujte podle kroků níže:

- + **Provádíte u stejného pacienta více kortizolových testů?** Pokud ano a již jste provedli úvodní kortizolový test, postupujte podle pokynů „**Pro další testy...**“ níže, abyste zajistili postupné seskupení všech kvantitativních výsledků a získali přístup ke **komplexním interpretačním komentářům**.
- + **Zadali jste informace protokolu?** Abyste mohli obdržet interpretační komentáře založené na výsledcích, musíte pro zpracování vzorku pacienta vybrat správný protokol a krok protokolu – postupujte podle níže uvedeného pracovního postupu specifického pro váš analyzátor:

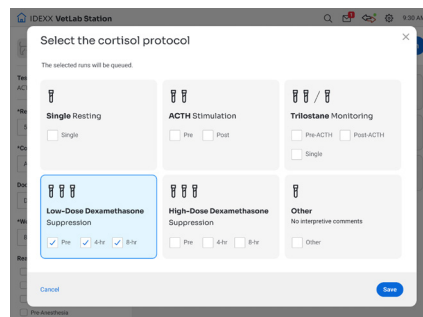

Pro úvodní kortizolové testy

Biochemický analyzátor Catalyst One™



Spustíte zpracování vzorku na stanici IDEXX VetLab™ Station. Na obrazovce Vybrat přístroje klepněte na ikonu **Catalyst One** a poté na **Kortizol**. Vyberte požadovaný protokol a jeho další kroky, klepněte na ikonu **Uložit** a poté na **Spustit**.

Pro další testy / vícekrokové kortizolové testování

Všechny kroky protokolu vybrané při zpracování úvodního testu se zobrazí v seznamu Probíhá v Úvodní nabídce stanice IDEXX VetLab Station. Když je čas zpracovat další vzorek, klepněte na další dostupný test v seznamu, klepněte na **Ve frontě** a poté na **Spustit**.

Biochemický analyzátor Catalyst Dx™



Spustíte zpracování vzorku, jak jste na stanici IDEXX VetLab Station zvyklí. Až budete na konci zpracování vzorku vyzváni, identifikujte protokol a krok protokolu a poté klepněte na **Odeslat**.

Poznámka: Pokud se rozhodnete zadat protokol / krok protokolu později, klepněte na pacienta v seznamu Probíhá, klepněte na **Přidat podrobnosti** a poté vyberte informace protokolu pacienta.

Aby byly další výsledky seskupeny s úvodním výsledkem a aby byly k dispozici interpretační komentáře:

1. Najděte úvodní výsledek kortizolu pacienta na stanici IDEXX VetLab Station **NEBO** vyberte příslušného pacienta ze seznamu Seznam čekající na vyřízení v Úvodní nabídce.
2. Klepněte na **Přidat test** a poté na **Přidat výsledky**.
3. Na obrazovce Výběr přístrojů vyberte **Catalyst Dx**.
4. Až budete na konci zpracování vzorku vyzváni, vyberte informace o protokolu zpracování vzorku a poté klepněte na **Odeslat**.

DŮLEŽITÉ: Pokud máte analyzátor Catalyst One a Catalyst Dx a chcete sledovat trendy výsledků kortizolu pacienta a/nebo provádět další testy / vícekrokové testování kortizolu, společnost IDEXX doporučuje, aby byly všechny kortizolové testy prováděny na stejném analyzátoru se stejným typem vzorku.

Zobrazení kvantitativních výsledků a interpretačních komentářů

Klepněte na zprávu v levém dolním rohu stanice IDEXX VetLab Station, která oznamuje, že výsledky pacienta jsou připraveny. Pokud jsou k úvodnímu kortizolovému testu přidány v rámci vícekrokového testování další testy, výsledky jsou seřazeny od posledního testu (nahore) po úvodní test (dole); u nejnovějších výsledků se zobrazují komplexní interpretační komentáře.