



Analyzátor IDEXX Coag Dx™

Stručná referenční příručka

Součásti analyzátoru Coag Dx™

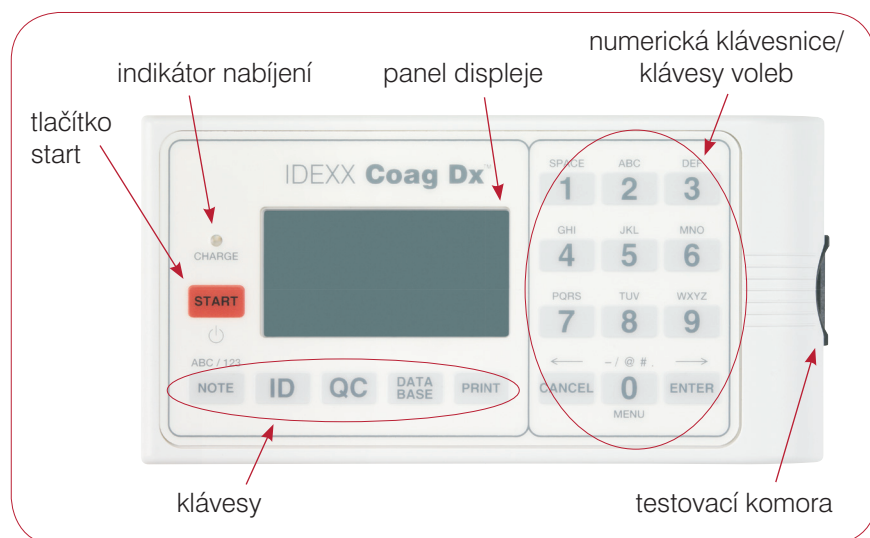

Analyzátor IDEXX Coag Dx - pohled shora

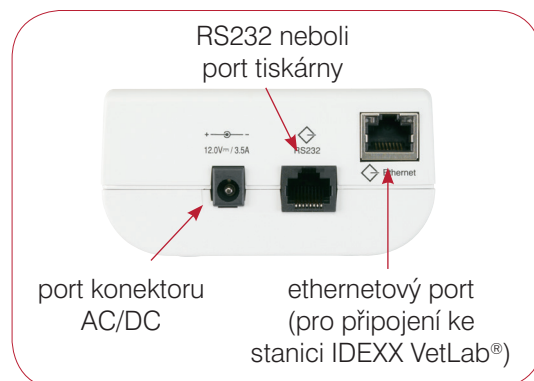

Analyzátor IDEXX Coag Dx - pohled z boku

Důležité:

Pro analyzátor IDEXX Coag Dx použijte pouze kazety IDEXX Coag Dx™.

Klávesy numerické/voleb/funkcí

Klávesa	Popis	Klávesa	Popis
Start	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí analyzátoru. Stiskněte pro spuštění testu. 	Data Base	Stiskněte pro zobrazení nabídky databáze údajů: <ul style="list-style-type: none"> Zobrazení počtu výsledků pacientů nebo EQC testů, které jsou nyní uloženy a jsou k dispozici. Zobrazení uložených výsledků pacientů nebo testů EQC. Smazat záznamy pacienta nebo EQC.
Note	Stisknutím můžete v režimu zadávání dat přepínat mezi abecedními (ABC) a číselnými (123) znaky.	0 – 9	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte pro výběr volby z nabídky. Stiskněte pro zadávání čísel nebo písmen. Stiskněte 0 pro zobrazení hlavní nabídky. Stiskněte 7 pro zobrazení předchozích výsledků nebo 9 pro zobrazení následujících výsledků.
ID	Stisknutím zobrazíte nabídku pro identifikaci pacienta kde můžete: <ul style="list-style-type: none"> Zadat identifikační údaje klienta (CID). Zadat identifikační údaje pacienta (PID). Zvolit druh. Vrátit se k poslednímu klientovi nebo pacientovi. 	Cancel	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte pro zastavení operace. Stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku (obrazovka „Insert ... Cartridge“). Stiskněte pro pohyb kurzoru doleva v režimu zadávání dat.
QC	Stiskněte pro zobrazení nabídky stavu QC (kontroly kvality), kde můžete zahájit test EQC (elektronické kontroly kvality). Testovací komora musí být při spuštění testu EQC prázdná.	Enter	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte pro přijetí a uložení údaje. Stiskněte pro pohyb kurzoru
Print	Stiskněte pro zobrazení nabídky k tisku, kde si můžete na externí tiskárně vytisknout výsledky nebo informace o systému.		

Upozornění k provozu

- Nechte napájecí modul AC/DC zapojený do analyzátoru a elektrické zásuvky, když se nepoužívá, a nechte analyzátor zapnutý.
- **Neotvírejte** analyzátor. Nejsou zde žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Otevřením analyzátoru porušujete dohodu o záruce a/nebo údržbě.
- **Nepoužívejte** jiné kazety než IDEXX Coag Dx.
- **Nepoužívejte** kazety, které mají prošlé datum expirace nebo byly nesprávně uskladněny.
- **Nevkládejte** kazetu do analyzátoru silou.
- **Nepoužívejte** nepřiměřenou sílu při stisku kláves analyzátoru.
- **Nevystavujte** analyzátor extrémním teplotám (nad 37 °C/98 °F nebo pod 0 °C/32 °F).
- **Chraňte** analyzátor před pádem. **Nepoužívejte** výsledky, pokud vám analyzátor během testu upadl.


Připojení analyzátoru Coag Dx™ ke stanici IDEXX VetLab® (verze 2.30 nebo novější)

Připojení analyzátoru IDEXX Coag Dx ke stanici IDEXX VetLab (obrázek 1) Vám umožňuje identifikaci klienta a pacienta a automaticky přenáší výsledky koagulačních vyšetření do dokumentace pacienta.

Důležité: Je-li analyzátor Coag Dx připojen ke stanici IDEXX VetLab, nelze spustit test z analyzátoru Coag Dx. Všechny testy musí být spuštěny ze stanice IDEXX VetLab.

Chcete-li připojit analyzátor Coag Dx ke stanici IDEXX VetLab:

1. Ujistěte se, že jsou analyzátor Coag Dx a stanice IDEXX VetLab zapnuté.
2. Připojte jeden konec ethernetového kabelu do ethernetového portu na boční straně analyzátoru Coag Dx.
3. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do routeru, který je připojen ke stanici IDEXX VetLab. Použijte první port LAN, který je k dispozici (označené 1, 2, 3 atd.).
4. **Důležité: Nepoužívejte** WAN port, který se připojuje k Internetu.
Když se na úvodní obrazovce stanice IDEXX VetLab objeví ikona Coag Dx, vaše připojení proběhlo úspěšně.

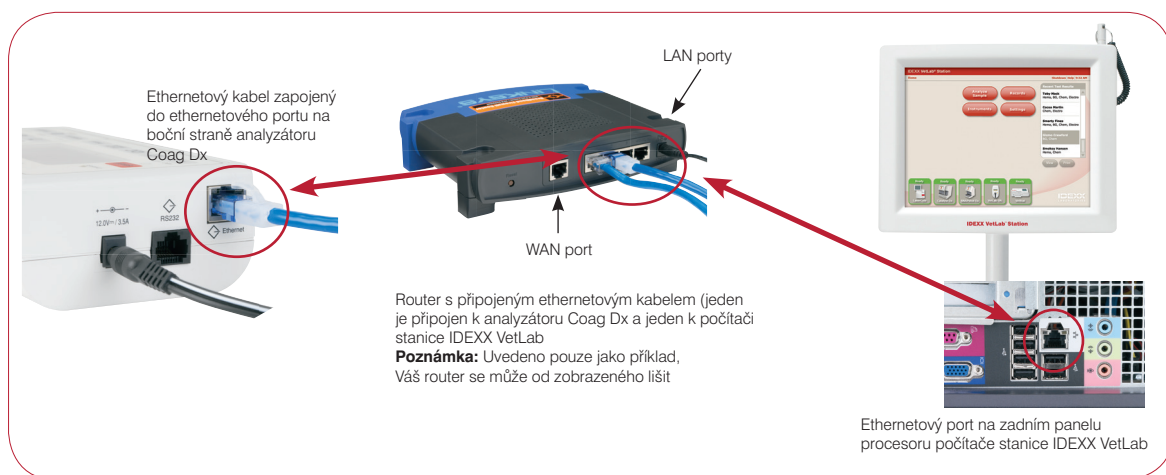

IDEXX Zákaznická podpora

Česká republika 239.018.034

Slovensko 0/268.622.417