

# Příručka pro údržbu analyzátorů

Analyzátor	Denně	Týdně	Měsíčně	Čtvrtletně	Ročně	Informace
IDEXX <b>VetLab® Station</b>		Zálohujte data. Restartujte.				
<b>Biochemie</b>  IDEXX <b>Catalyst Dx®</b>  IDEXX <b>Catalyst One®</b>		Restartujte přístroj na IVLS obrazovce.  Vyčistěte každý týden vnitřek zásobníku na odpad ubrouskem, který nepouští vlákna, navlhčeným v 70% isopropylalkoholu (Ize objednat na IDEXX Zákaznické podpoře).	Po výzvě analyzátoru vyčistěte vnitřní součásti (kroužek inkubátoru, optiku a karusel) ubrouskem, který nepouští vlákna, navlhčeným v 70% isopropylalkoholu (proti směru hodinových ručiček).  V případě, že je analyzátor Catalyst DX® nebo Catalyst One® provozován v prostředí, které je zaprášené nebo špinavé, filtr ventilátoru je třeba čistit každý měsíc.  Proveďte kontrolu kvality za použití kontrolního séra VetTrol a Catalyst QC CLIP (Ize objednat na IDEXX Zákaznické podpoře).  Centrifugu vyčistěte jednou za měsíc, nebo dle potřeby při ze separátoru plné krve ze separátoru krve.	Vyčistěte filtr ventilátoru za normálních laboratorních podmínek.		<p><b>Nikdy</b> nepoužívejte čisticí materiály (jako např. čisticí ubrousky s alkoholem, které obsahují hydrogenuhličitán sodný), které zanechávají usazeniny při vypařování alkoholu/rozpouštědel.</p> <p>Po výzvě analyzátoru je nezbytné, abyste vyprázdnili zásobník odpadu. Analyzátor nebude fungovat, když je zásobník odpadu plný.</p> <p><b>Nikdy</b> neotírejte analyzátor nebo jeho okolí čisticími prostředky na bázi amoniaku. Zamezte vzniku zápachu moči kolem analyzátoru. Amoniak v atmosféře falešně zvyšuje hodnoty výsledku testu amoniaku (NH<sub>3</sub>) při provádění kontroly kvality a při testování amoniaku ve vzorku pacienta.</p>

Pro IDEXX Zákaznickou podporu volejte:



239.018.034



0/268.622.417

Tato doporučení jsou převzata z uživatelských příruček a jsou předmětem vlastnických práv. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Všechny ostatní ochranné známky ®/™ jsou vlastnictvím společnosti IDEXX Laboratories, Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

**IDEXX**  
LABORATORIES