

# Příprava vzorků plné krve pro hematologický analyzátor IDEXX ProCyte Dx\*

1



Použijte odpovídající EDTA zkumavku. IDEXX podporuje:

- Standardní zkumavky: zkumavky IDEXX VetCollect\* nebo zkumavky BD Vacutainer\* 13 x 75 mm (2,0 ml) s uzávěrem BD Hemoguard\*
- Mikrozkušavky: Použijte 1,3ml zkumavky (např. 1,3ml zkumavka Sarstedt) nebo 650µl zkumavky

2



Odeberte vzorek pomocí injekční stříkačky nebo vakuového systému pro odběr krve. Nezapomeňte použít jehlu s průměrem vhodným pro pacienta.

3




Přeneste vzorek do zkumavky.

- Použijete-li **injekční stříkačku**, přeneste vzorek do zkumavky okamžitě. Pokud použijete zkumavku s pryžovou zátkou, protlačte stříkačku přes zátku a nechte vzorek přirozeně nasávat pomocí podtlaku.
- Používáte-li **vakuový systém pro odběr krve**, odeberte vzorek přímo do EDTA zkumavky.


**Poznámka:** Pokud je z EDTA zkumavky odstraněn uzávěr, před umístěním do analyzátoru vsuňte jehlu skrz zátku, aby se tlak vzduchu ve zkumavce vyrovnal.

4

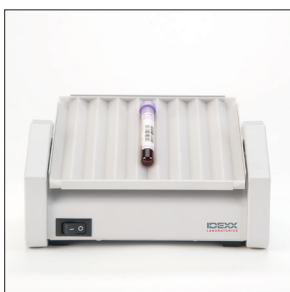

Promíchejte vzorek umístěním zkumavky na třepačku po dobu 30 sekund, nebo ručně vzorek 10krát převraťte.

5

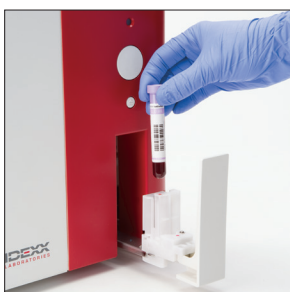

Nechte vzorek zpracovat hematologickým analyzátozem ProCyte Dx\*

## IDEXX Zákaznická podpora

Česká republika 239.018.034

Slovensko 0/268.622.417