

Příručka pro údržbu analyzátorů

Analyzátor		Denně	Týdně	Měsíčně	Čtvrtletně	Ročně	Informace
	IDEXX VetLab® Station		Zálohujte data. Restartujte.				
Hematologie							
	IDEXX ProCyte™	Analyzátor se každý den v 19:00 dle výchozího nastavení přepne do pohotovostního režimu „Standby“. (Čas může být změněn - viz str. F-1 v uživatelské příručce). Ráno - ukončení pohotovostního režimu „Standby“ (cca 8 min.).	Vypněte analyzátor a IPU (pokyny pro vypnutí analyzátoru, viz „Vypnutí analyzátoru“ na straně A-7 uživatelské příručky).	Měsíční procedura proplachování 5% bělícím roztokem (trvá 25 min.), strana F-2 v uživatelské příručce. Nechte proběhnout kontrolu kvality [e-Check* (XS)] Strana E-1 v uživatelské příručce. Vnější části analyzátoru čistěte vlhkým (ne mokrým) hadříkem, který neuvolňuje vlákna. Vyčistěte filtr ventilátoru. Zálohujte data a vytiskněte zprávu o výkonu.			Nedodržení procedury pohotovostního režimu může vést k nepřesným výsledkům. IDEXX doporučuje přepnout analyzátor do pohotovostního režimu každý den vždy po dokončení analýz, nebo alespoň jednou za 24 hodin, pokud přístroj běží nepřetržitě. Pro měsíční oplachování použijte pouze filtrované a neparfémované bělidlo bez povrchově aktivních látek. NEPOUŽÍVEJTE parfémovaná bělidla nebo neznačkové verze standardního bělidla. NEPOUŽÍVEJTE vodu z vodovodu. Roztok může být použit až jeden týden po jeho přípravě. e-Check * (XS) je materiál pro kontrolu kvality používaný ke sledování výkonu analyzátoru ProCyte Dx®. Nepoužívejte žádné jiné materiály ke kontrole kvality analyzátoru. Prach a zvířecí chlupy mohou způsobit poruchy analyzátoru. Pravidelně otírejte analyzátor a okolní plochy vlhkým hadříkem. Při čištění filtru ventilátoru by analyzátor měl být vypnutý. Proto se doporučuje čistit filtr během každotýdenního procesu restartu, kdy jsou analyzátor i IPU vypnuty.

Pro IDEXX Zákaznickou podporu volejte:



239.018.034



0/268.622.417

Tato doporučení jsou převzata z uživatelských příruček a jsou předmětem oznámení vlastnických práv. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Všechny ostatní ochranné známky ®/™ jsou vlastnictvím společnosti IDEXX Laboratories, Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

IDEXX
LABORATORIES