


Analyzátor IDEXX VetLab® UA™

Stručná referenční příručka

Čtení IDEXX UA™ Strips


Použijte čerstvou moč, která nebyla centrifugována. Vzorek moči důkladně promíchejte. Vzorek by měl mít při provádění testu pokojovou teplotu a neměl by stát déle než jednu hodinu.

Další pokyny naleznete v Příručce k obsluze analyzátoru IDEXX VetLab® UA™.

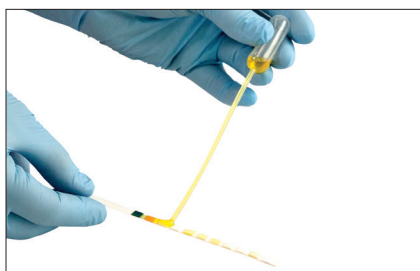


- 1 Pomocí pipety naneste na proužek UA™ vzorek moči, ujistěte se, že všechny reagenční zóny jsou navlžené. Proužek nepřehýbejte.

DŮLEŽITÉ: Do analyzátoru IDEXX VetLab® UA™ lze použít pouze proužky IDEXX UA™. Nepoužívejte žádnou jinou značku proužků.

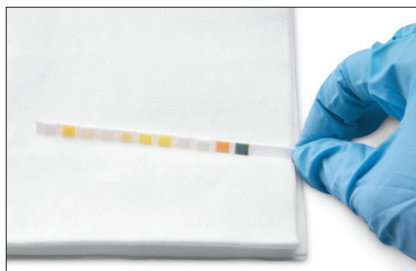


- 2 Krátce (asi jednu sekundu) oklepte dlouhý okraj a pak zadní stranu testovacího proužku o absorpční povrch (např. papírovou utěrku).

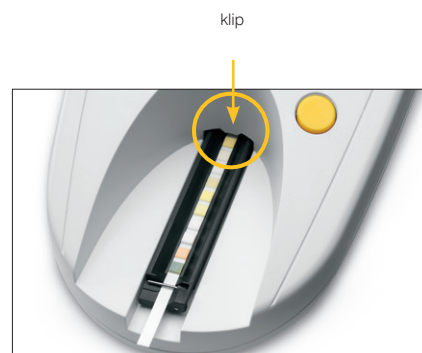

- 3 Umístěte testovací proužek reagenčními zónami směrem nahoru do zásobníku na testovací proužky tak, aby jeho přední okraj byl u vstupního otvoru zachycen klipem.

Úchytná lišta musí být otevřená. Asi 2 mm proužku má být zachyceno pod klipem.

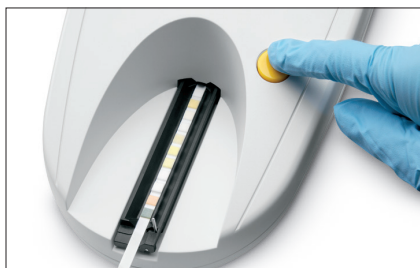

- 4 Stiskněte tlačítko **Start**. Zazní zvukový signál. Zásobník se mírně posune a úchytná lišta se uzavře. Zásobník na testovací proužky automaticky vloží testovací proužek do analyzátoru, aby jej bylo možné odečíst a potom se vrátí do výchozí polohy. Nevyjímejte testovací proužek, dokud se analyzátor nevrátí do režimu připraveno k měření. Od okamžiku, kdy stisknete tlačítko start, trvá dokončení všech měření přibližně 80 sekund.



- 5 Po vytištění výsledků, vyjměte a zlikvidujte testovací proužek. Pomocí čistícího ubrousku, který nepouští vlákna, otřete důkladně zbytky moči ze zásobníku.

POZNÁMKA: Je-li analyzátor UA™ připojen ke stanici IDEXX VetLab®, dojde k automatickému přenosu výsledků testu.

IDEXX Zákaznická podpora

Česká republika 239.018.034

Slovensko 0/268.622.417