

Čištění analyzátoru SNAP Pro*

Pro čištění interních komponent (provádí se každý týden nebo podle potřeby)



1. Vypněte analyzátor a odpojte napájecí šňůru a/nebo ethernetový kabel.




2. Na spodní straně vypnutého analyzátoru pomocí plochého šroubováku nebo mince otočte dva stříbrné upevňovací prvky o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.



3. Sundejte základnu z analyzátoru.



4. Vyčistěte **celou** základnu hadříkem nepouštějícím vlákna nebo vatovým tamponem navlhčeným 70% izopropylalkoholem, jemným roztokem tekutého mýdla a vody nebo 10% roztokem bělidla.

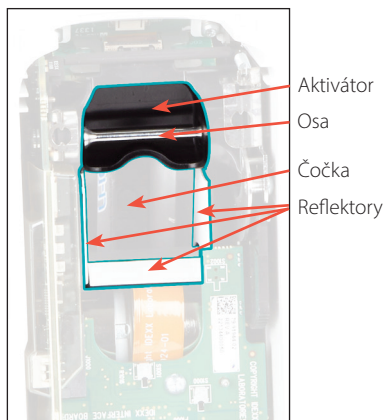

5. Vyčistěte tři bílé reflektory, osu a aktivátor novým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo vatovým tamponem navlhčeným 70% izopropylalkoholem, jemným roztokem tekutého mýdla a vody nebo 10% roztokem bělidla. **NEČISTĚTE čočku.**



6. Po vysušení základnu připojte zpět k analyzátoru a ujistěte se, že zaklapla na místo.



7. Otočte stříbrné upevňovací prvky ve směru hodinových ručiček o čtvrt otáčky, aby se základna uzamkla.



8. Ujistěte se, že jsou základna a stříbrné upevňovací prvky v rovině s analyzátozem a jsou uzamknuty na místě. **Neuzamknutí základny a upevňovacích prvků může mít vliv na výkon analyzátoru.**

Pro čištění krytu a obrazovky analyzátoru (provádí se podle potřeby)



Vyčistěte kryt a obrazovku analyzátoru hadříkem nepouštějícím vlákna navlhčeným 70% izopropylalkoholem, jemným roztokem tekutého mýdla a vody nebo 10% roztokem bělidla.

NEOTÍREJTE větrací otvory pod tlačítkem napájení ani porty USB/napájení/ethernetu.

Při čištění nevystavujte analyzátor:

- X** organickým rozpouštědly
- X** čisticím přípravkům obsahujícím amoniak
- X** inkoustovým popisovačům
- X** sprejům obsahující tekavé kapaliny
- X** insekticidům
- X** desinfekčním prostředkům
- X** leštidlům
- X** osvěžovačům vzduchu