

Analyzátor SNAP Pro

Analyzátor SNAP Pro* je automatizační nástroj pro testy prováděné v ordinaci, který odesílá výsledky do elektronické zdravotní dokumentace pacienta, čímž šetří čas i peníze. Po zavedení systému SNAP Pro jste získali výhody automatizace, ale stále jste museli výsledky testů SNAP* zadávat ručně. Díky nové funkci ProRead* na analyzátoru SNAP Pro* se výsledky testů SNAP načítají automaticky, čímž ušetříte další krok v pracovním procesu SNAP a váš analyzátor SNAP Pro bude pro vás nyní ještě cennější.


Zobrazování výsledků ProRead

Pomocí preferovaného pracovního postupu provedte test SNAP. Po dokončení analýzy si všimnete, že obrazovka Výsledky vypadá podobně jako bez funkce ProRead. Rozdíl je v tom, že nyní jsou výsledky poskytovány za vás – již nemusíte otevírat okno s výsledky a ručně zadávat jednotlivé pozitivní nebo negativní výsledky.

Výsledky budou nejenže automatizované, v závislosti na nich bude měnit i barva stavové kontrolky na analyzátoru. Když je stavová kontrolka:

- **Zelená** – všechny výsledky jsou negativní.
- **Modrá** – nejméně jeden výsledek je pozitivní.
- **Žlutá** – výsledek může být nutné ověřit kvůli velmi světlým místům nebo neočekávanému vývoji barev (například nečistotám nebo modrému nádechu) v okně výsledků. Pokud se zobrazenými výsledky souhlasíte, klepnutím na ikonu **Check Mark** (Zaškrtnutí) ✓ výsledek uložte. V opačném případě klepněte na příslušnou ikonu s výsledkem a poté klepněte na ikonu **Check Mark** (Zaškrtnutí) ✓. Chcete-li test zrušit a vrátit se na domovskou obrazovku, klepněte na ikonu ✗.

Barva stavového indikátoru ukazuje stav výsledku.

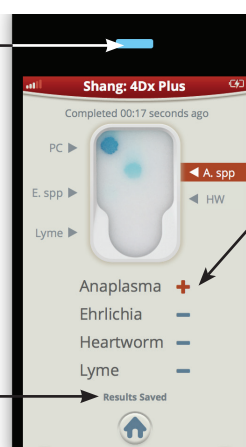

Pozitivní výsledky jsou označeny červeně.

Výsledky jsou ukládány automaticky.


Zelená =
všechny výsledky jsou **negativní**.



Modrá =
nejméně jeden výsledek je **pozitivní**.



Žlutá =
k dokončení cyklu je nutný zásah uživatele

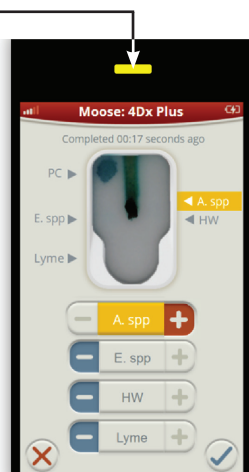

Potřebujete pomoci?
Navštivte stránky idexx.com/prohelp, kde najdete užitečná instalační videa a podpůrnou dokumentaci.